

溫馨提示 頁面中顯示的 價格 ¥XX.XX 是品牌建議零售價！



# 安睡鼻呼吸貼

## 小小一貼

## 還你舒適健康的睡眠



### 產品資訊

產品名稱：安睡鼻呼吸貼

材質：矽黏合劑、聚酯切片、聚丙烯

單片尺寸：約42mm\*18mm

規格：15片/盒

產地：日本

使用期限：3年



### 注意事項

#### 注意事項

- 1.本品用於防止睡眠時的口呼吸，請勿用於其他用途
- 2.無法鼻呼吸（鼻塞或感冒）者請勿使用
- 3.無法自行揭下本品者請勿使用
- 4.嬰幼兒，皮膚/嘴唇敏感者請勿使用
- 5.皮膚敏感或皮膚異常（傷口濕疹皮炎等）者請勿使用
- 7.本品為一次性用品，一片請使用一次
- 8.使用中皮膚感到不適（如瘙癢、疼痛等）或皮膚出現異常（如紅腫、紅疹等），令您感覺不適合使用時，請停止使用。如果皮膚問題仍得不到改善，請攜帶本品前往醫院皮膚科就診。
- 9.使用中如果感到不適或呼吸困難，請停止使用
- 10.黏貼時請勿覆蓋整個嘴唇

#### 使用方法

- 1揭下透明薄膜
- 2閉上嘴後，將本品豎貼在嘴唇中央  
(請務必事先確認是否可以用鼻子呼吸)
- 3睡覺時可一直貼著本品



## 安睡鼻呼吸貼

ナイトミン 鼻呼吸テープ

- 只需貼在嘴上，便可通過物理原理將呼吸方式調整為鼻呼吸
- 可消除口腔/喉嚨乾燥和打鼾，有效改善睡眠品質  
※以上效果是通過促使人睡眠時使用鼻子呼吸來達到的(我司實驗表明)。具體效果因人而異
- 使用溫和的黏著劑，揭下時不傷皮膚



單片尺寸：約42mm×18mm



杏林大學醫學部附屬醫院  
睡眠醫療醫生 中島亨先生監修

#### 使用方法

